



چک لیست IQ

تاریخ: شماره مدرک: SJAA999AS SJAB999AS SJAC999AS SJAD999AS SJAE999AS SJAF999ASP
شماره تجدید نظر: ۰۰

مشخصات دستگاه

نام دستگاه: هندسیلر مدل دستگاه: شماره سریال دستگاه: شماره اموال: سایر مشخصات:

مشخصات مشتری

نام خریدار: سازمان انتقال خون ایران پایگاه انتقال خون: تاریخ نصب دستگاه (تاریخ مراجعه):
آدرس محل نصب: استان: شهرستان: تلفن: آدرس:

مشخصات سازنده

آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر ۲۴ جاده سنتو، شهرک صنعتی ماشین سازی و فن آوری های برتر، خیابان صنعت ۸، واحد ۶۷ تلفکس: ۰۳۰-۰۲۹۸-۲۴۰۰ (۰۵۱۱)

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات نصب	عنوان اقدام انجام شده	مرحله کاری
	NOT OK	OK			
			کابل تغذیه دستگاه دارای ارت مناسب می باشد	بررسی الکتریکی	۴
			از کانکتور دو شاخه نری مخصوص برای اتصال آداپتور به برق استفاده شده است		
			برق تغذیه دارای مشخصات: بدون نوسان شدید، تک فاز ۵۰HZ با 220VAC می باشد		
			دستگاه با رعایت کلیه اصول حمل صحیح به محل مورد نظر انتقال یافته است	اقدامات نصب و تحویل دهی دستگاه	۵
			نظافت داخلی و ظاهری دستگاه و لوازم جانبی آن مناسب می باشد		
			با روشن نمودن کلید اصلی، دستگاه روشن می شود		
			با اتصال آداپتور شارژ به برق و اتصال آن به دستگاه باتری شارژ می گردد		
			به پرسنل بخش با هماهنگی مدیریت مربوطه، آموزش های لازم جهت اپراتوری دستگاه داده شده است	تحویل دهی مستندات	۶
			دفترچه راهنمای اپراتوری دستگاه تحویل گردید		
			برگ راهنمای گارانتی دستگاه تحویل گردید		
			فرم های کنترلی و تایید تولید کننده تحویل گردید		
			کارت گارانتی دستگاه تکمیل و تحویل گردید		
			گواهی کالیبراسیون تحویل گردید	تحویل دهی ابزار و قطعات	۷
			۱ عدد دسته سیل مخصوص تحویل گردید		
			۱ عدد درپوش یدکی فک سیل تفنگی تحویل گردید		
			۱ دستگاه آداپتور شارژ مخصوص moscot 10 – 20 cells 0.9A (Type CR6ps		
			(با کابل و سر فیش مربوطه تحویل گردید		
			۱ عدد کابل پاور مربوطه تحویل گردید		
			۱ عدد کابل ویژه دارای سوکتهای BNC مخصوص اتصال دسته سیل تفنگی به دستگاه اصلی تحویل گردید		
			۱ عدد کاور مخصوص تحویل گردید		
			۱ عدد کیف مخصوص حمل تحویل گردید		
			۱ عدد پد نظافت تحویل گردید	دستگاه تحت شرایط فوق تحویل پایگاه گردید.	

نماینده تحویل گیرنده	نماینده خدمات پس از فروش
امضاء	امضاء
تاریخ	تاریخ



چک لیست IQ

تاریخ:
 شماره مدرک: SJAA999ASPI
 SJAB999ASPI SJAC999ASPI
 SJAD999ASPI SJAE999ASPI
 SJAF999ASPI
 شماره تجدید نظر: ۰۰

مشخصات دستگاه

نام دستگاه: هندسیلر..... مدل دستگاه: شماره سریال دستگاه.....
 شماره اموال: سایر مشخصات.....

مشخصات مشتری

نام خریدار: سازمان انتقال خون ایران پایگاه انتقال خون: تاریخ نصب دستگاه (تاریخ مراجعه):
 استان: شهرستان: تلفن:
 آدرس محل نصب: آدرس:

مشخصات سازنده

آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر ۲۴ جاده سنتو، شهرک صنعتی ماشین سازی و فن آوری های برتر، خیابان صنعت ۸، واحد ۶۷ تلفکس: ۰۵۱۱)۲۴۰۰۲۹۸-۳۰۰

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات نصب	عنوان اقدام انجام شده	مرحله کاری
	NOT OK	OK			
			جعبه بسته بندی از جهت مناسب در محل نصب قرار گرفته است	بررسی بسته بندی دستگاه و مشخصات محصول	۱
			جعبه بسته بندی دستگاه سالم است		
			متعلقات و لوازم جانبی دستگاه سالم است		
			جعبه بسته بندی دستگاه در حضور پرسنل واحد خدمات پس از فروش در محل نصب قرار گرفته است		
			بسته بندی دستگاه توسط پرسنل واحد خدمات پس از فروش گشوده شده است	خروج دستگاه از جعبه بسته بندی	۲
			بدنه دستگاه اصلی پس از خارج نمودن از جعبه سالم است و کاستی، ایراد و آسیبی به آن وارد نشده است		
			بدنه دسته سیل تفنگی و کلیه قطعات و لوازم جانبی دستگاه از نظر ظاهری سالم می باشند		
			دستگاه طبق کاتالوگ از داخل جعبه خارج و در محل نصب قرار گرفته است		
			محل استقرار، محیطی با شرایط استاندارد آزمایشگاهی مناسب است	بررسی محل نصب	
			محل استقرار دستگاه عاری از وسایل حرارت زا، مواد شیمیایی و گازهای سمی خطرناک می باشد		
			امکان کثیف شدن و نفوذ گرد و غبار، و مایعات مضر، دود، حشرات و حیوانات موذی و غیره به محل استقرار دستگاه وجود ندارد		

دستگاه تحت شرایط فوق تحویل پایگاه گردید.

نماینده تحویل گیرنده	نماینده خدمات پس از فروش
امضاء	امضاء
تاریخ	تاریخ