

باسمه تعالی

شرایط لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه اسکنر سه بعدی کف پا

شرکت پایافناوران فردوسی

- این دستگاه بر روی پایه چرخدار قرار دارد و بیمار باید روی صندلی نشسته و پای خود را بر روی آن قرار دهد. همچنین این دستگاه قابلیت قرارگیری در کنار تخت معاینه و اسکن از پای بیمار در حالت درازکش را نیز دارا می باشد. فضای مورد نیاز برای این دستگاه ۱ متر مربع است.
- کامپیوتر جهت نصب نرم افزار با ویندوز ۱۰، نسخه ۶۴ بیت (x64) مورد نیاز است. حداقل مشخصات کامپیوتر Core i3، 2.00 GB RAM، 5G HDD و Intel HD Graphic 630 مورد نیاز است.
- تمامی درایورها، به خصوص گرافیک، را لطفا قبل از نصب نرم افزار نصب نمایید.
- جهت نصب دستگاه فیلم آموزشی برای شما ارسال می گردد.
- رطوبت محل نگهداری می بایستی زیر 65 درصد باشد.
- ورودی برق 220 ولت بدون نوسان است.