

«شرکت طراحی نگارانديشان»

طراح و توليدكننده دستگاه‌های EEG و EMG

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

✓ شرایط نصب و راه‌اندازی

- فراهم بودن ارت مناسب
- وجود استبلايزر به منظور تثبيت ولتاژ برق شهر ورودی به دستگاه (در محدوده ۲۲۰ ولت)
- شرایط محیطی مناسب شامل دما، رطوبت، خطر نفوذ آب، آسیب‌پذیری مکانیکی، میزان ذرات گرد و غبار
- سطح نویز محیطی از لحاظ نبود امواج رادیویی و دستگاه‌های پزشکی با امواج الکترومغناطیس ساطع‌شونده (مانند MRI، CT-Scan، ...) در اطراف دستگاه

✓ شرایط نگهداری

- استفاده درست از لوازم جانبی به نحوی که سیم آن‌ها کشیده نشوند. همچنین با اتصال پورت‌ها به ورودی دستگاه آسیبی وارد نشود.
- کالیبراسیون دستگاه به صورت سالانه لازم است.
- به روزرسانی سالانه نرم‌افزار مورد نیاز است.
- در صورت جابجایی دستگاه، با مهندسین شرکت هماهنگ شود.