

## شرایط نصب و راه اندازی دستگاه استرلایزر پلاسما مدل PSP- PL – 130D

1. دریچه تهویه هوا (مکنده) ترجیحا در بالای دستگاه تعبیه گردد.
2. فضای مناسب جهت قرار دادن دستگاهی با ابعاد (W×H×L) 1040× 1750× 1060
3. محل نصب دستگاه باید مجهز به برق تک فاز 230 ولت و اتصالات زمین باشد. بدیهی است نصب تابلو برق 20 آمپر الزامی می باشد.
4. محل نصب باید مجهز به پریز ارت دار باشد به صورتی که بتوان ارت را چک کرد.
5. محل نصب به گونه‌ای باشد که دستگاه حداقل یک متر از دیواره ها فاصله داشته باشد.
6. دمای محل نصب باید بین 15 تا 27 درجه سانتی گراد باشد.
7. اتاق کثیف و تمیز باید توسط یک دیوار از هم جدا شوند.
8. برق ورودی دستگاه مجهز به استیلایزر (Stabilizer) 3.5 kVA باشد.

تلفن هماهنگی: 74676 داخلی 119

موجود بودن اقلام زیر در هنگام نصب لازم و ضروری می باشد:

- 1- اندیکاتور شیمیایی یا کاغذی ; یک بسته (250 تایی)
- 2- اندیکاتور بیولوژیک ; بسته به نیاز بیمارستان (10 تایی); لطفا هنگام خرید به تاریخ انقضا توجه داشته باشید
- 3- رول تایوک مخصوص پلاسما با توجه به ابزار مورد استفاده بیمارستان سایز رول را تعیین کنید.
- 4- دستگاه سیلر