



شرکت فنی و مهندسی هوشمند پژوه

تجهیزات انتقال خون و آزمایشگاهی پزشکی

Hooshmand Pajooch Technical engineering Co.LTD.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

Installation Qualification (IQ) For HTS100 Hemosealer

| نام کارشناس نصب | تاریخ نصب | شماره سریال | کد تجهیز | شماره اموال | محل نصب | مدل تجهیز | نام تجهیز |
|-----------------|-----------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | HTS100 | هموسیلر |

- ۱- پس از باز کردن کارتن دستگاه ، بدنه و بخش اصلی دستگاه که یک باکس فلزی است ، سالم و بدون ضربه خوردگی و عیب میباشد. بله/قبول خیر/مردود
- ۲- کانکتور نری BNC نصب شده روی بدنه دستگاه جهت اتصال کابل مشکی رنگ (کابل کواکسیال) کاملاً محکم و بدون شلی و لقی میباشد. بله/قبول خیر/مردود
- ۳- شارژر باتری دستگاه موجود و در بازبینی چشمی کاملاً سالم میباشد . بله/قبول خیر/مردود
- ۴- بخش هندگان یا بخش دستی سیلر ، موجود و ظاهر آن سالم و حفاظ شیشه ای الکتروهای فلزی هندگان سالم و بدون شکستگی میباشد . بله/قبول خیر/مردود
- ۵- کابل برق آداپتور دستگاه در سمت ۲۲۰ ولت ، موجود و سالم بوده و هیچ قسمتی از آن دچار پاره گی حفاظ کابل نگردیده است . بله/قبول خیر/مردود
- ۶- کابل برق شارژر از سمت ولتاژ کم و جک فلزی انتهایی آن سالم بوده و دچار پاره گی حفاظ کابل نگردیده است. بله/قبول خیر/مردود
- ۷- کابل مشکی رنگ کواکسیال بطول ۱۲۰ سانتیمتر از هر دو طرف آن سالم بوده و دارای هیچگونه پاره گی و لقی در محل اتصال سیم به رابطهای فلزی نمی باشد. بله/قبول خیر/مردود
- ۸- پریز برق و یا پریز سیار مورد استفاده دستگاه سالم و بدون شکستگی و ترک خوردگی است. بله/قبول خیر/مردود
- ۹- کانکتور های مادگی BNC روی خروجی دستگاه و ورودی هندگان بدون شکستگی و لقی میباشدند . بله/قبول خیر/مردود
- ۱۰- رطوبت هوای سالن نصب دستگاه بین ۱۰٪ تا ۸۰٪ می باشد . بله/قبول خیر/مردود
- ۱۱- دستگاه های گرمایشی و سرمایشی در سالن نصب دستگاه موجود می باشد . بله/قبول خیر/مردود
- ۱۲- دمای سالن نصب دستگاه بین ۲۰ الی ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد . بله/قبول خیر/مردود
- ۱۳- برق ورودی شارژر باتری دستگاه(ولتاژبرق موجود در پریز برق آداپتور) AC ۲۲۰ V ، 5A و 50Hz ، با خطای +/- ۵ ولت است . بله/قبول خیر/مردود
- ۱۴- لوح فشره روش کاربری دستگاه (CD کاربری دستگاه) همراه دستگاه موجود است . بله/قبول خیر/مردود

تذکر : بروز حوادث از قبیل آتش سوزی، ضربه، نوسانات برق ، خبط اپراتوری و کاربری ناصحیح شامل گارانتی نمیشد .

دستگاه فوق پس از نصب و راه اندازی و انجام تستهای مورد نیاز به همراه آموزش کامل کاربری ، صحیح و سالم تحویل مرکز گردید .

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| پایگاه انتقال خون استان : | شهر: | شرکت فنی و مهندسی هوشمند پژوه |
| نام و نام خانوادگی کارشناس: | مهر پایگاه: | نام و نام خانوادگی کارشناس: |
| امضاء: | مهر شرکت: | امضاء: |

Tel : (009821) 44329806 - 8 Fax : (009821) 44321833 Mob. (0098912) 1395059

تهران، بلوار شهران، بالاتر از میدان دوم، ساختمان بانک پاسارگاد، (پلاک ۱۵۳) طبقه سوم، واحد ۱۶

Unit :16, 3rd Floor, No.153 ,(Pasargad Building) Shahrān Blvd, Tehran, Iran

Email : Hooshmandpajooch@yahoo.com