

کدفرم/ویرایش: F320/00	الزامات نصب دستگاه IQ	شرکت دانش پژوهش فجر
-----------------------	------------------------------	----------------------------

شماره سریال :

نوع دستگاه : یخچال بانک خون / اینکوباتور پلاکت

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	بله	خیر		
	ok		سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	1
	ok		سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن بسته بندی (چرخها- شیشه جلو- کلیه قطعات پنل برق و کنترل)	2
	ok		حداقل فاصله دستگاه از اطراف 35 سانتیمتر باشد	3
	ok		دمای محیط کار در رنج 2 ± 23 باشد	4
	ok		رطوبت محیط کار در رنج 20% الی 60%	5
	ok		در حد معمول تراز باشد	6
	ok		حداقل امکانات تهویه هوا موجود باشد	7
	ok		اطمینان از سالم بودن پرریز مورد استفاده و همچنین earth آن (برای دستگاه یک پرریز مستقل در نظر گرفته شود)	8
	ok		در صورت استفاده از سیم سیار از کابل (3 X 1/5 یک رشته earth) استفاده شود	9
	ok		در صورت نوسان برق بیشتر از حد مجاز از استبلایزر مطابق توان مصرفی دستگاه استفاده شود	10

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: 1- کنترل کیفیت 2- واحد اقدام کننده