

شرایط محیطی موردنیاز برای نصب دستگاه

اسکنر لام کامل CELLNAMA LS۵

شرایط مناسب و کافی:

- یک میز نسبتاً محکم که فضای کافی برای قرارگیری دستگاه و متعلقات آن داشته باشد.
- دمای اتاق نگهداری بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد باشد.

شرایط ایدئال:

- اتاق نگهداری در پایین طبقه‌ی ساختمان (زیرزمین)، دور از خیابان اصلی یا هرگونه منبع ارتعاش (دستگاه‌های آزمایشگاهی دیگر که ایجاد نویز می‌کنند) باشد.
- دمای اتاق بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد باشد.
- دستگاه روی میز میکروسکوپی (دفع‌کننده و عایق لرزش) قرار بگیرد.
- جهت استفاده از سیستم تله‌پاتولوژی، اینترنت پهنای باند با سرعت آپلود بالای ۲۰ Mbs تعبیه شود.
- اتصال به چاه ارت
- تأمین منبع تغذیه از سیستم برق اضطراری UPS