

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه میکروهماتوکریت ۲۴خانه فول

دیجیتال

به منظور جلوگیری از احتمال برق گرفتگی دو شاخه محصولات این شرکت دارای سیستم اتصال به زمین است بنابراین بهتر است از پریزی استفاده نمایید که مجهز به **earth** (اتصال به زمین) باشد.

دستگاه شما با برق ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز و نوسانات برقی تا ۲۰٪ در صد ولتاژ اسمی را تحمل کرده و هیچ مشکلی در کار کردن دستگاه ایجاد نخواهد کرد. در پشت دستگاه در بالای جک فیوز (محل اتصال کابل برق به دستگاه) یک کلید **power** قرار داده شده که برق ورودی دستگاه را قطع و وصل میکند و برای شروع کار پس از وصل کابل برق دستگاه به پریز برق شهر کلید این دستگاه را در حالت **on** قرار دهید تا چراغ آن روشن شود.

توجه: دستگاه به فاصله ۲۰ سانتی متر با سایر دستگاه ها قرارداد داده شود.

سانتریفیوژ باید در یک سطح صاف با پایه های محکم قرارداد داده شود تا دستگاه لرزش نداشته باشد.

دمای محیط کار سانتریفیوژ نباید بالاتر از ۲۵ درجه سانتی گراد باشد. که مانع داغ شدن موتور دستگاه گردد.