

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری :

با توجه به وزن دستگاه، قبل از نصب و راه اندازی، محل کلینیک با نظر مهندس ناظر بررسی و میزان وزن بر هر متر مربع بررسی و نتیجه گیری میشود. بر این اساس زیر سازه های لازم برای استقرار دستگاه انجام شده و میزان وزن دستگاه در کف اتاق با توجه به زیرسازه های صورت گرفته پخش شده و تعدیل میشود. همچنین بر اساس ابعاد دستگاه اندازه ی اتاق سنجیده میشود که مانعی برای دستگاه و تأسیسات آن ایجاد نگردد.

لازم به ذکر است برای کلینیک هایی که در همکف و یا زیر زمین قرار گرفته اند، نیازی به زیر سازی وجود نخواهد داشت.

قبل از نصب و راه اندازی دستگاه، برای سیستم گرمایش دستگاه، وجود پکیج ( با حداکثر توان حرارتی ۲۴ کیلو وات) در محل قرارگیری ضروری ست.

مشخصات دستگاه	
حداکثر وزن بیمار	۲۵۰ کیلوگرم
حداکثر عمق آب	۱۳۵ سانتیمتر
دامنه سرعت	۰٫۱۵ الی ۱۰ کیلومتر بر ساعت
دامنه دما	از دمای محیط تا ۳۶ درجه سانتیگراد
ابعاد دستگاه	طول ۲٫۷۰ متر* عرض ۱٫۱۰ متر* ارتفاع ۱٫۷۰ متر
وزن دستگاه پر از آب	۲۳۰۰ کیلوگرم
وزن دستگاه بدون آب	۳۰۰ کیلوگرم
ظرفیت	۲۰۰۰ لیتر
برق ورودی دستگاه	۲۲۰ ولت تک فاز، ۶۰/۵۰ هرتز
زمان مورد نیاز برای انتقال آب جهت ورود و خروج کاربر	یک دقیقه و نیم برای حداکثر عمق آب

