

کد فرم / ویرایش: FIN01		الزامات نصب دستگاه IQ		ابتکار تجهیز طب یکتا
شماره سریال :			نوع دستگاه : هموسیلر دیجیتال شنگ کسه خون	
توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	ردیف
	بله	خیر		
			سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	۱
			سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی (دستگاه هموسیلر - دسته - شارژر باتری اتوماتیک - ۳ عدد کابل انتقال فرکانس بالا)	۲
			دمای محیط کار در رنج 23 ± 2 باشد	۳
			رطوبت محیط کار در رنج ۱۰٪ الی ۷۰٪	۴
			محل قرارگیری در حد معمول تراز باشد	۵
			اطمینان از سالم بودن پریز مورد استفاده و همچنین اتصال earth آن (برای دستگاه یک پریز مستقل در نظر گرفته شود)	۶
			در صورت استفاده از سیم سیار از کابل (۲,۵ X ۳ یک رشته دارای اتصال earth) استفاده شود	۷
			در صورت نوسان برق بیشتر از حد مجاز از استابلایزر ۵ kva مطابق توان مصرفی دستگاه استفاده شود یا از محافظ ولتاژ توصیه شده شرکت استفاده گردد.	۸
			ولتاژ برق ۲۲۰ ولت متناوب با فرکانس ۵۰ هرتز مناسب برای شارژر باتری این دستگاه می باشد.	۹
			از قرار دادن شارژر در تابش مستقیم آفتاب ، محیط های مرطوب ، زیر باران و یا روی وسایل گرم کننده خودداری کنید.	۱۰
			استفاده از هر نوع شارژی به غیر از شارژر ارائه شده همراه دستگاه باعث آسیب جدی به دستگاه می شود.	۱۱

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: ۱- کنترل کیفیت ۲- واحد اقدام کننده