



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه  
اندازی و نگهداری

**[www.raadlab.ir](http://www.raadlab.ir)**  
**E-mail: [info@raadlab.ir](mailto:info@raadlab.ir)**  
**[iran\\_radteb@hotmail.com](mailto:iran_radteb@hotmail.com)**

**هود IVF**  
**مدل R-IVF**

**IVF Hood**  
**R-IVF model**

ساخت شرکت رادطب نوین زیست پایا  
به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

## ۱. نکات مهم در استفاده از دستگاه

- محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
- استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.
- در صورت ریختن مایعات روی سطح استیل کار و عبور آن از منافذ و انتقال به زیر سطح با برداشتن سینی ، کف هود و سینی را تمیز و استریل نموده و مجدداً سینی را در جای خود قرار دهید.
- در صورت نیاز به تعویض فیلترهای هود لامینارفلو با این شرکت تماس حاصل فرمائید .