

«شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری» آرمان تجهیز مدیسا

مجموعه تجهیزات ارزیابی ساختاری-عملکردی پا، ستون فقرات و ساختار قامتی Ortho Station مدل OS1-ATM

- دمای مناسب هوا: ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد
- محیط تمیز بدون گرد و غبار و نوسانات الکترومغناطیس
- عدم مجاورت موبایل، فلزات و بخصوص آلیاژهای آهنی با ماژول های تیلت متر و اسپاینال ماوس
- فضای استقرار دستگاه: ۲×۲ متر
- در نظر گرفتن طول walkway مناسب برای راه رفتن بیمار به طول ۴ متر (۲ متر قبل و ۲ متر بعد از دستگاه)
- رطوبت مناسب: ۲۰ الی ۶۰ درصد
- سیستم کامپیوتر با مشخصات حداقلی Core i5, 4 GB RAM, 10 GB HDD, Intel HD Graphics 630
- دانگل های بلوتوث و وای فای
- رعایت شرایط محیطی مطابق دفترچه راهنما و مندرجات برگ گارانتی