

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم Fornix II

۱) محل استفاده دستگاه باید دارای محافظت های لازم برای جلوگیری از ورود گرد و غبار باشد.

۲) دستگاه باید با فاصله مناسب از سیستم های نویز زا (انواع دستگاه های آزمایشگاهی، دستگاه های تراش، کمپرسور، پمپ، آسانسور و...) نصب شود.

۳) هنگام استفاده از دستگاه می بایست حتما از منبع تغذیه داخلی (باتری قابل شارژ) خود سیستم استفاده نمود و نباید در هنگام شارژ از دستگاه جهت تحریک استفاده نمود.

۴) دستگاه حتما می بایست توسط اپراتور آموزش دیده و مسلط مورد استفاده قرار گیرد. (تایید کار با دستگاه توسط شرکت سازنده برای اپراتور اجباری می باشد).

۵) با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.

۶) از تمیزکننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.

۷) از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الکل های غلیظ (بالای ۳۵ درصد) جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.

۸) شرایط دمایی مجاز برای استفاده از این سیستم بازه دمایی (۰ الی ۶۰ درجه سانتیگراد) و جهت رطوبت ۴۵ الی ۶۰ درصد می باشد.