

## شرایط نگهداری

- ۱ - ورودی- خروجی دستگاه را در مسیر فاضلاب دستگاه دیالیز نصب نمائید.
- ۲ - کابل دیتای دستگاه را به پورت USB کامپیوتر متصل کنید.
- ۳ - با استفاده از کلید، دستگاه را روشن نمائید.
- ۴ - نرم افزار دستگاه را اجرا نمائید.
- ۵ - برای بالا بردن صحت نتایج دستگاه حداقل نیم ساعت فرصت دهید تا لامپ دستگاه به دمای عملکردی پایدار خود برسد.
- ۶ - در قسمت setting تنظیمات لازم را انجام دهید.
- ۷ - زمان Auto save را تنظیم کنید.
- ۸ - علامت Auto save را بزنید.
- ۹ - کلید start را بزنید.
- ۱۰ - با استفاده از یک مانع از رسیدن نور به فیبر نوری جلوگیری کرده و کلید Read Dark را بزنید.
- ۱۱ - بعد از اینکه دستگاه دیالیز به شرایط پایدار خود رسید (از نظر دما و غلظت ) و قبل از اتصال آن به بیمار، کلید Read Ref را بزنید.
- ۱۲ - حالا دستگاه آماده بکار است و بر اساس تنظیمات فوق طیف را اندازه گیری و بر اساس آن مقدار مواد را تخمین می‌زند.

### توجه:

- ۱ - دستگاه را عمودی قرار دهید تا حباب هوای احتمالی در جذب نور اخلال ایجاد ننماید.
- ۲ - بعد از هر بار استفاده دستگاه را ضد عفونی و با آب مقطر شستشو دهید.