

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم Brain Stem I

- (۱) محل استفاده دستگاه باید دارای محافظت های لازم برای جلوگیری از ورود گرد و غبار باشد.
- (۲) دستگاه باید با فاصله مناسب از سیستم های نویز زا (انواع دستگاه های آزمایشگاهی، دستگاه های تراش، کمپرسور، پمپ، آسانسور و...) نصب شود.
- (۳) هنگام استفاده از دستگاه می بایست حتما از منبع تغذیه داخلی (باتری قابل شارژ) خود سیستم استفاده نمود و نباید در هنگام شارژ از دستگاه جهت تحریک استفاده نمود.
- (۴) دستگاه حتما می بایست توسط اپراتور آموزش دیده و مسلط مورد استفاده قرار گیرد. (تایید کار با دستگاه توسط شرکت سازنده برای اپراتور اجباری می باشد).
- (۵) با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- (۶) از تمیزکننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- (۷) از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الکل های غلیظ (بالای ۳۵ درصد) جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.
- (۸) شرایط دمایی مجاز برای استفاده از این سیستم بازه دمایی (۰ الی ۶۰ درجه سانتیگراد) و جهت رطوبت ۴۵ الی ۶۰ درصد می باشد.
- (۹) از آغشته کردن یا فرو بردن این سیستم در مایعات به شدت خودداری نمایید.
- (۱۰) از این وسیله در محیط های خیلی مرطوب استفاده ننمایید. همچنین از استفاده از سیستم در صورت خیس شدن قسمتی از آن پرهیز نمایید.
- (۱۱) این سیستم برای فعالیت در کنار مواد بی حسی قابل اشتعال با هوا یا اکسیژن یا اکسید نیتروژن گواهی نشده است. عواقب استفاده از این سیستم در کنار اتمسفر قابل اشتعال جو ناشناخته می باشد.
- (۱۲) این سیستم برای استفاده در محیط با میدان مغناطیسی قوی (شامل، اما نه محدود به MRI) گواهی نشده است. عواقب استفاده از این سیستم در محیط های دارای خاصیت مغناطیسی قوی ناشناخته می باشد.
- (۱۳) از این سیستم در دماهای خارج از محدوده ذکر شده در این دفترچه راهنما خودداری نمایید. عواقب استفاده از این سیستم در خارج محدوده دمایی ناشناخته می باشد.