

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم Fornix II

- (۱) محل استفاده دستگاه باید دارای محافظت های لازم برای جلوگیری از ورود گرد و غبار باشد.
- (۲) دستگاه باید با فاصله مناسب از سیستم های نویز زا (انواع دستگاه های آزمایشگاهی، دستگاه های تراش، کمپرسور، پمپ، آسانسور و...) نصب شود.
- (۳) هنگام استفاده از دستگاه می بایست حتما از منبع تغذیه داخلی (باتری قابل شارژ) خود سیستم استفاده نمود و نباید در هنگام شارژ از دستگاه جهت تحریک استفاده نمود.
- (۴) دستگاه حتما می بایست توسط اپراتور آموزش دیده و مسلط مورد استفاده قرار گیرد. (تایید کار با دستگاه توسط شرکت سازنده برای اپراتور اجباری می باشد).
- (۵) با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- (۶) از تمیزکننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- (۷) از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الکل های غلیظ (بالای ۳۵ درصد) جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.
- (۸) شرایط دمایی مجاز برای استفاده از این سیستم بازه دمایی (۰ الی ۶۰ درجه) و جهت رطوبت ۴۵ الی ۶۰ درصد می باشد.