

مشخصات فنی شیکر انکوباتور پلاکت شرکت پویا الکترونیک یاران

بدنه بیرونی از جنس فلز با رنگ الکتروستاتیک

بدنه داخلی از جنس پی وی سی

ایزوله‌ی هوایی یکدست

دارای حداکثر ۴ طبقه متحرک جهت قرار دادن کیسه های پلاکت

دارای سنسور pt100 با دقت ۰/۰۲ درجه

دارای موتور گیربکسی ۹ دور در دقیقه

سیستم پلتیر جهت تولید دما



Laboratory Equipments

شرکت پویا الکترونیک یاران

نحوه کارکرد شیکر انکوباتور پلاکت

ابتدا دستگاه را به برق شهر متصل کرده و سیستم دیجیتال دستگاه اتوماتیک روشن می‌گردد. دگمه ی set رازده و عدد مورد نظر را بر روی دمای انتخابی با استفاده از کلید بالا و پایین مشخص نموده و سپس دگمه set را مجددا زده در این حالت دستگاه شروع به کار میکند، جهت راه اندازی موتور بدلیل ثابت بودن دور موتور دستگاه فقط از کلید off و on استفاده می‌گردد .

مشاوره، طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی

شیراز/ تقاطع خیابان فردوسی - حر / مجتمع فردوسی / طبقه ۲ / واحد ۲۱۸
تلفن گویا: ۳۲۲۹۵۶۸

www.pecolab.ir info@pecolab.ir

آزمون های تحویل دهی

تست دما

تست دور موتور

تست آلارم دستگاه



مشاوره، طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی

شیراز / تقاطع خیابان فردوسی - حر / مجتمع فردوسی / طبقه ۲ / واحد ۲۱۸
تلفن گویا: ۳۲۲۹۵۶۸

www.pecolab.ir info@pecolab.ir

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال می‌باشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه می‌باشد.

شرایط لغو ضمانت‌نامه

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس با نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعمل‌های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
۳. صدمات و خرابی‌های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه‌ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب،
۴. صدمات ناشی از نصب یا به‌روزرسانی هر نوع فایل، نرم‌افزار، برنامه یا توسط افراد غیرمجاز،
۵. دستگاه‌هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان شرکت تعمیر شود.